



Gabarit de mesure

Avant la première utilisation des condoms Coripa, vous devez déterminer la taille de condom, qui vous est recommandée. Suivez pour cela les instructions ci-après :

1ère ETAPE

Découpez les deux **gabarits** le long de la ligne pointillée. Déterminez le volume de votre pénis avec le gabarit I. Pour cela, placez le gabarit autour du centre de votre pénis en érection et lisez le code lettre sur le marquage fléché.

2ème ETAPE

Déterminez la longueur de votre pénis avec le gabarit II. Pour cela, tenez le **gabarit** sous votre pénis en érection. Veillez à tenir la ligne hachurée à l'emplacement jusqu'auquel vous pouvez dérouler le condom. Lisez le code chiffre à la pointe de la glande.

3ème ETAPE

En regroupant le code lettre et chiffre, vous obtenez la taille de condom Coripa, qui vous est recommandée (par exemple 15M).


Dans le tableau ci-dessous sont mentionnées toutes les tailles de condom Coripa disponibles.

Si la taille de condom, qui vous est recommandée, n'était pas disponible, veuillez nous en informer et choisir la taille de condom adaptée la plus proche possible.

INDICATION :

Chez la plupart des clients, la taille de condom recommandée assure le positionnement optimal du condom. Il se peut toutefois que, dans un cas isolé, la taille doive être corrigée légèrement. Pendant l'application, veillez donc à un bon positionnement du condom.

ATTENTION : prenez garde aux coins de papier tranchant pendant l'application !

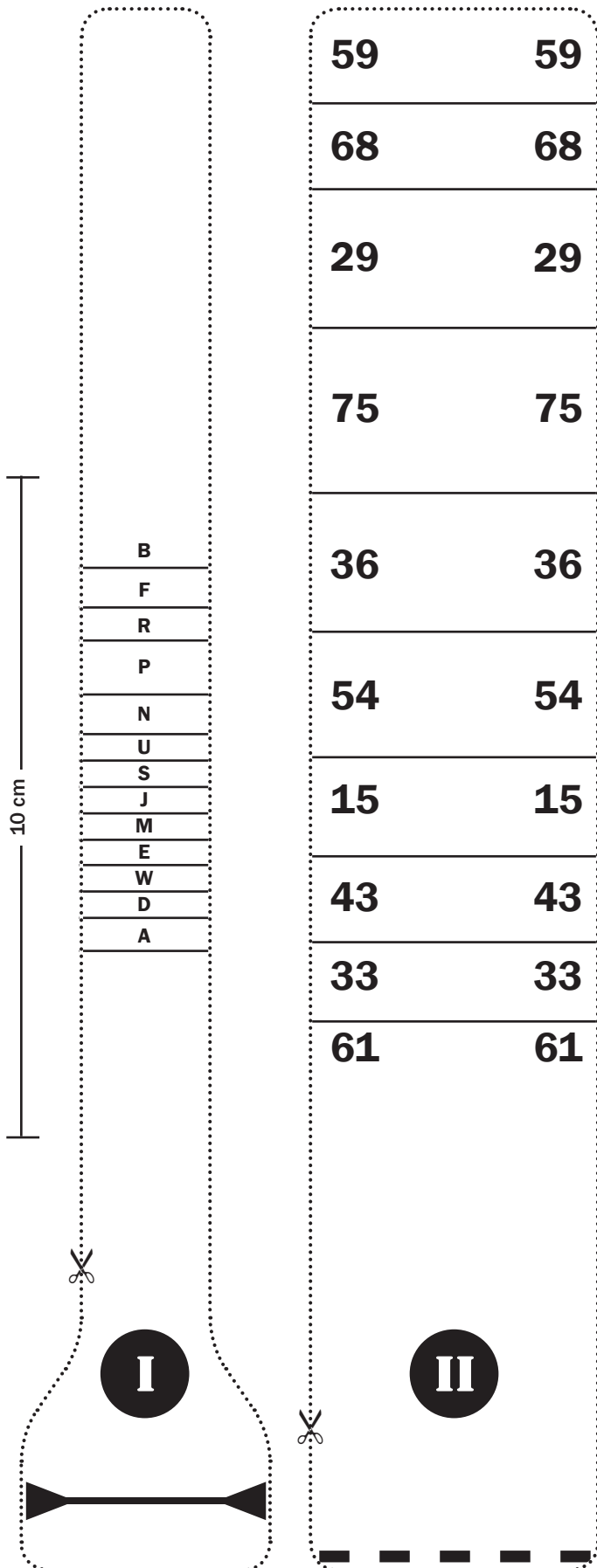

59	59
68	68
29	29
75	75
36	36
54	54
15	15
43	43
33	33
61	61

LARGE ➔ PLUS LARGE

	A	D	W	E	M	J	S	U	N	P	R	F	B
61	61A	61D	61W	61E									
33	33A	33D	33W	33E	33M								
43	43A	43D	43W	43E	43M	43J	43S						
15		15D	15W	15E	15M	15J	15S	15U					
54			54W	54E	54M	54J	54S	54U	54N				
36					36M	36J	36S	36U	36N	36P			
75						75J	75S	75U	75N	75P	75R		
29								29U	29N	29P	29R	29F	
68									68N	68P	68R	68F	68B
59											59R	59F	59B